



緊急運搬救助具「おんぶ隊 救護用」使用方法

本製品「おんぶ隊 救護用」はスタンダードタイプに足掛け紐を付けたタイプとなっております。


【各部名称】

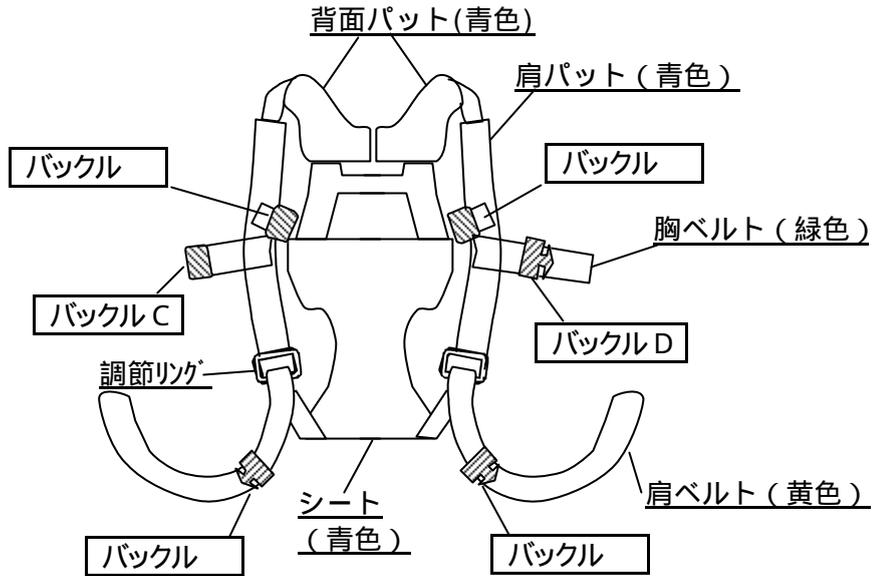


1. 背負われる方は肩ベルトに足を通しシートに座れる姿勢をとる

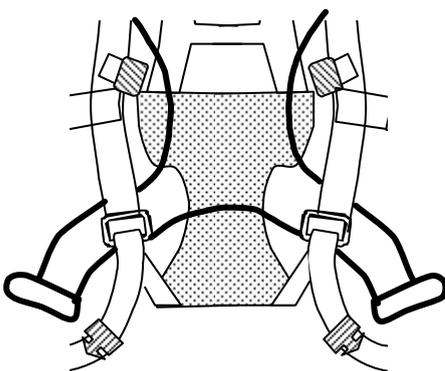



2. 背負う人が肩パットに両腕を通し背負う

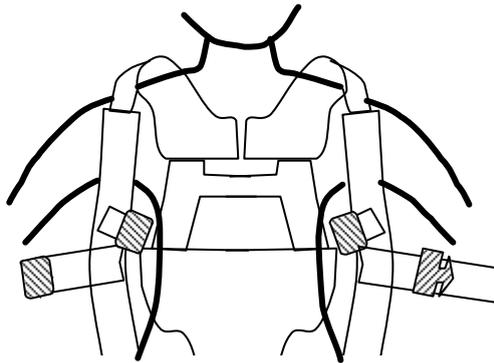


3. バックルCとD(緑色)を接合し胸ベルトをひっぱります

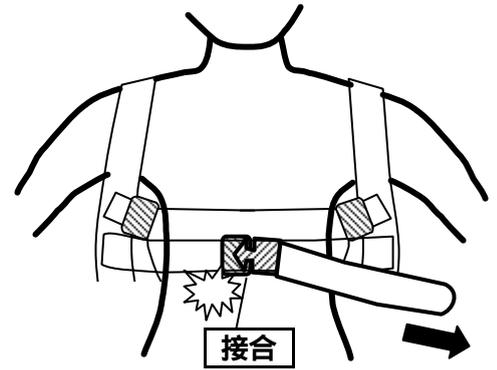

4. バックル を背負われる人の大腿部の内側から外側へ一周させバックル に接合します

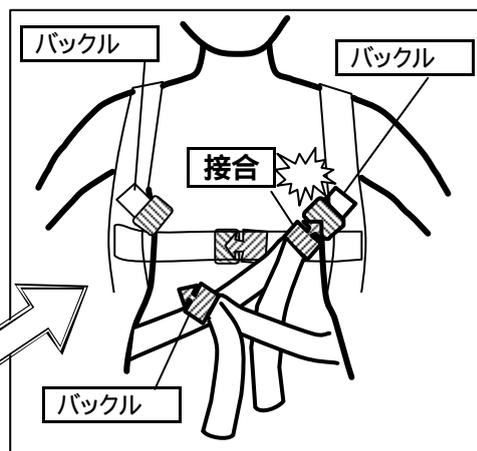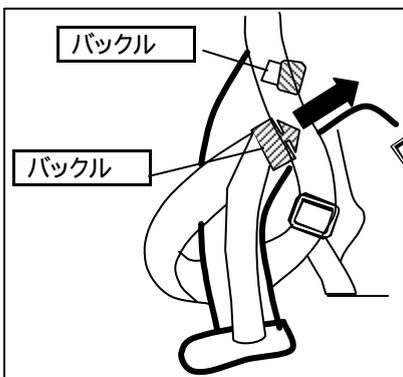

6. 最後に肩ベルトをひっぱり調節します

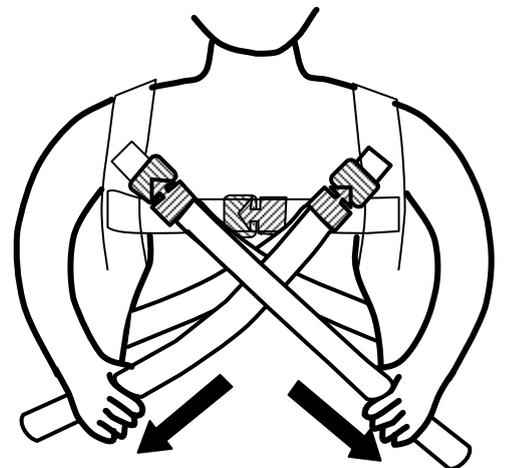

5. 4.と同様の要領でバックル をバックル に接合します

お問い合わせ先 日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスック平河町ビル

電話 03-3288-3339